

# Darmkrebs-Früherkennung

## Handhabung des Testes

1



Vor- und Nachname und das Datum der Probenahme auf das etikettierte Probenröhrchen schreiben.

2



Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier/Auffanghilfe in die Toilette legen.

3




Nach dem Stuhlgang das Probenröhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.

4



Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

5

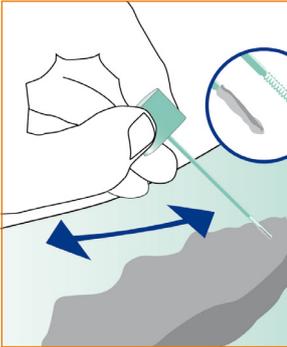

Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.

6



Teststab in das Probenröhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Probenröhrchen auslaufsicher verschlossen. Probenahme nicht wiederholen!

7



Das verschlossene Probenröhrchen **kräftig schütteln**. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.

8



Bringen Sie das Probenröhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.